


TECH



NEA98PRO



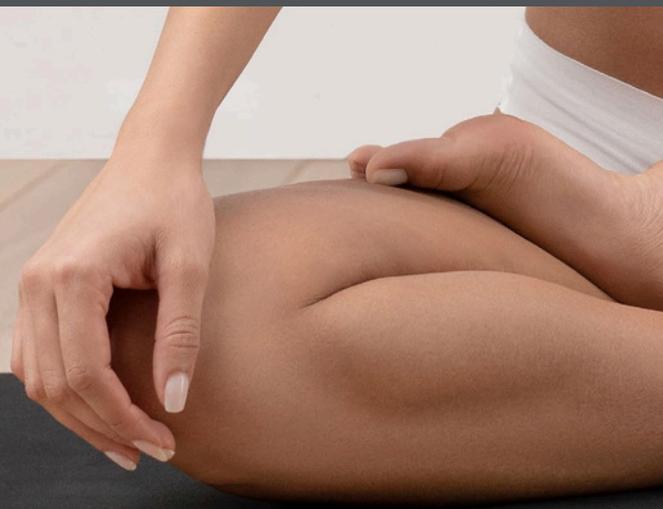

L'objectif d'Arosha a toujours été la recherche d'un équilibre entre l'innovation scientifique et le bien-être personnel grâce à des solutions et des protocoles de beauté conçus pour chaque besoin. Des années d'expérience et de travail aux côtés des meilleurs professionnels du monde entier ont montré combien il est important de combiner les traitements cosmétiques avec l'utilisation de technologies esthétiques, en maximisant les bénéfices et en réduisant le temps nécessaire pour les obtenir. C'est pourquoi, dans notre gamme de produits, nous avons accordé une attention particulière au secteur Tech.

Chaque appareil sélectionné est le résultat d'un choix minutieux visant les besoins quotidiens de ceux qui appliquent et reçoivent nos protocoles de beauté. C'est ainsi que la science et la technologie se mettent au service de l'homme et de son bien-être.



PRESSOTHÉRAPIE

La compression intermittente est un traitement simple qui consiste à appliquer sur les membres des brassards pneumatiques reliés à une pompe. Elle offre un gonflage séquentiel qui favorise le mouvement et le métabolisme des systèmes veineux et lymphatique. Après le dégonflage, il y a un intervalle de temps avant le regonflage. L'opération de gonflage et de dégonflage est répétée jusqu'à ce que le temps soit écoulé ou que le bouton d'arrêt soit activé. L'application d'une légère pression et de longs mouvements augmente le flux du système lymphatique, ce qui permet d'éliminer les toxines du corps et de nettoyer l'ensemble du système lymphatique. L'ajout du bandage Arosha dans le protocole signifie qu'il fournit des ingrédients ciblés pour des résultats à long terme encore meilleurs dans un temps plus court.

Pressotherapy Benefits:

1. Élimination des toxines.
2. Améliorer le drainage lymphatique et le système immunitaire : le système lymphatique recueille les toxines et les fait passer par les systèmes de filtration que sont les ganglions lymphatiques. Un bon fonctionnement du système lymphatique permet de réduire les risques d'affections mineures, telles que les rhumes et les virus de la grippe.
3. Réduire le gonflement des tissus : amincissement du corps.
4. Éviter l'accumulation de cellulite et réduire les formes légères de cellulite : l'effet peau d'orange peut être une conséquence malheureuse de l'écrasement des canaux lymphatiques dans les pieds et les mains, empêchant la circulation. Il est possible d'inverser partiellement le processus, mais il est préférable de le prendre à temps avec des traitements réguliers. Avec le bandage et le drainage lymphatique, on peut obtenir une perte d'aspect de la cellulite de deux degrés. Le cocktail anti-cellulite contenu dans les bandages, à base de caféine, d'escine, de guarana, de centella asiatique, d'extrait d'algue fucus et bien d'autres encore, agit en synergie pour faire fondre la graisse de l'intérieur et stimuler l'excès de liquide qui est ensuite évacué par l'action drainante de l'appareil.
5. Effet de massage : les clients auront l'impression d'un véritable massage du corps. Il est même possible de régler la fréquence, rapide ou lente, ce que la main d'un homme ne peut pas toujours faire manuellement.
6. Lisser la peau : améliorer la circulation sanguine, la nutrition et le transport de l'oxygène.

Pour plus d'informations, voir le MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

LX 9

Pressomassage dispositif

AROSHA LX9 est un modèle portable de haute qualité, facile à utiliser, avec un design compact et des programmes efficaces pour le drainage lymphatique, la circulation ou le massage musculaire. Le principe de fonctionnement est que le corps principal de l'appareil souffle l'air dans les 4 chambres accessoires : brassard de bras, brassard de jambes, brassard de taille et brassard du centre du corps.



Cod. Art.: ART101018



FUNCTION

- Instrument portable
- Facile à installer et à utiliser
- Facile à utiliser



CHARACTERISTICS

- 4 programmes sélectifs
- Plage de pression : 20 ÷ 200 mmHg
- Plage de temps réglée : 5 - 90 minutes
- Temps de maintien : 0 - 6 secondes



EQUIPMENT

- 1 appareil
- 2 brassards de jambes à 4 chambres
- 1 brassard de taille à 4 chambres
- 1 Tube à sortie unique
- 1 Tube à double sortie
- 1 Répartiteur de tuyau
- 1 Sac noir personnalisé



OPTIONAL

- Manchette centrale à 4 chambres
- Manchette de bras à 4 chambres
- Extension pour manchette de bras
- Extension pour le brassard de jambe



2 "one touch" leg cuff



Waist cuff "one touch"



Center body cuff "one touch"



Arm cuff "one touch"

INFO

Dimensions de l'appareil : 26x16x120 cm
 Poids : 2 Kg
 Produit certifié CE
 Lire le manuel d'instructions pour toutes les informations.

PROTOCOLES D'UTILISATION AROSHA LX9


Clinical cases	Duration of session	Mode selection	Pressure (mmHg)	Speed	Suggested cuff
cellulite FIBREUSE	30-35 min	B	60~130mmHg	3	Kit de drainage ou manchette centrale
Cellulite oedémateuse	40 min	B	60~130mmHg	3	Kit de drainage ou brassard
Adiposité	30-35 min	B	60~130mmHg	3	Kit de drainage ou manchette centrale
Drainage lymphatique complet	35-40 min	B	30~60mmHg	3	Kit de drainage
Drainage lymphatique partiel	30 min	B	30~60mmHg	3	Manchette de jambe ou brassard
Detoxification	30 min	B	40~80mmHg	3	Kit de drainage ou brassard
Amélioration de la circulation	30 min	C	40~80mmHg	3-4	Kit de drainage ou brassard
Pour une peau élastique	30 min	C	40~80mmHg	3-4	Manchette de jambe ou brassard
Antistress	20-25 min	C	30~80mmHg	3-5	Kit de drainage
Massage	30 min	A	60~130mmHg	2	Kit de drainage ou manchette centrale
Pieds ou mains froids	25-30 min	A	40~100mmHg	3-4	Manchette de jambe ou brassard
Exercise effects	20 min	A	60~100mmHg	3-4	Kit de drainage ou manchette centrale
Arrangement Pelvis	30 min	D	80~120mmHg	3	Kit de drainage

Ajouter les bandes Arosha dans le protocole, c'est apporter des principes actifs ciblés pour des résultats encore meilleurs à long terme et dans des délais plus courts.



ULTRASONIC EFFECT


L'onde ultrasonique à haute fréquence provoque un mouvement de cromassage :

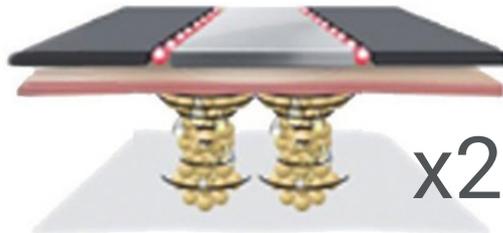

1. Augmente la température (effet thermique), stimule le métabolisme des graisses et améliore la microcirculation.
2. Causes the oscillation of the adjacent cells (mechanical effect) able to create pressure differences that alter the permeability of the cell membrane. Promotes separation of complex molecules and causes weakening of collagen agglomerations containing adipocytes (fibrolytic action)
3. Crée une altération partielle du niveau de PH à l'échelle locale et favorise les changements dans la perméabilité des membranes cellulaires. Cet effet est dû aux forces d'accélération considérables auxquelles les cellules doivent faire face lors du passage de l'onde ultrasonore (effet chimique).

ÉLECTROLIPOLYSE SOUS-CUTANÉE


Effets de la stimulation électrique dans le tissu adipeux :

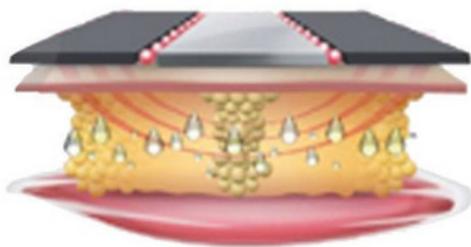

IN THE ADIPOCYTES: Stimulation of the beta receptors in the adipocyte membrane and activation of the enzymes active in triglyceride lysis (able to break up triglycerides into glycerol+fatty acids that can be expelled by the blood and lymph flow)

Rupture de l'équilibre ionique entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Les cellules doivent consommer beaucoup d'énergie (activation de la pompe sodiumpotassium) pour rétablir l'équilibre ionique. La stimulation électrique entraîne donc une consommation d'énergie et une augmentation de l'activité cellulaire. Induction de l'électrolyse des métabolites accumulés à l'intérieur et à l'extérieur des cellules qui, une fois dégradés et divisés en ions, peuvent être éliminés par les voies excrétrices normales. Augmentation de la température et donc de la consommation d'énergie. DANS LES VAISSEAUX SANGUINS ET LYMPHATIQUES : Stimulation des fibrilles musculaires dans les parois des petits vaisseaux avec une amélioration conséquente du tonus vasculaire, du flux d'oxygène et de la diffusion des nutriments pour un meilleur drainage des catabolites.

ÉLECTROSTIMULATION MUSCULAIRE

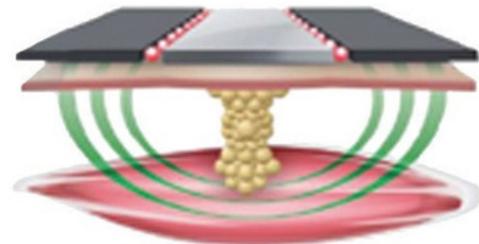

Effets de la stimulation électrique sur le tissu adipeux : ELECTROSTIMULATION MUSCULAIRE La stimulation électrique « simule » le travail du système nerveux central qui commande des contractions, provoquant une sorte de gymnastique passive qui augmente encore le métabolisme, utilise le déploiement des graisses opéré par la lipolyse pour produire de l'énergie, améliore et tonifie les muscles. La stimulation électrique agit également sur la microcirculation, en améliorant le tonus des parois des vaisseaux, en favorisant le transport de l'oxygène et l'élimination des déchets : EFFECTUER UNE ACTION DE RENFORCEMENT ET DE TONIFICATION SUR UN MUSCLE SOUMIS À UN STRESS POUR AUGMENTER LE MÉTABOLISME BASAL.

WAVESHAPE 3.0

Appareil à ultrasons/micro-courants avec plaques fixes

Appareil spécial de programme corporel fonctionnant par l'utilisation combinée et synergique d'ultrasons et de pas moins de six types d'ondes électriques différentes pour obtenir un effet unique et complet. Cet appareil combine l'utilisation synergique d'ultrasons et de courants électrolipolytiques pour un traitement plus complet, plus efficace et plus profond des accumulations localisées de tissu adipeux, de la lipodystrophie cellulaire, de la rétention d'eau et du relâchement de la peau.



Cod. Art.: ART431041

FUNCTION

- Dispositif portable
- Facile à installer
- Facile à utiliser



CHARACTERISTICS

- 8 plaques qui transmettent des ultrasons et de l'électricité
- 3 catégories de traitements : drainage et cellulite, tonification, bien-être



EQUIPMENT

- n. 8 plaques à ultrasons
- n. 1 porte-plaque en plexiglas
- n. 1 bandes élastiques (L) 105 x (H) 13 cm
- n. 3 bandes élastiques (L) 90 x (H) 13 cm
- n. 4 bandes élastiques (L) 60 x (H) 13 cm
- n. 16 électrodes en silicium 60x85 mm
- n. 5 cartes mémoire



Silicone electrodes



Ultrasound plates



Elastic bands

INFO

Dimensions de l'appareil : 26x26x12 cm

Poids : 2 Kg

Produit certifié CE

Lire le manuel d'instructions pour toutes les informations.

Arosha WAVESHAPE 3.0 combiné avec AROSHA BANDAGES garantit des améliorations efficaces et rapides avec des résultats visibles dès les premières séances et permet à l'esthéticienne de travailler « les mains libres ». Des résultats statistiques préliminaires démontrent l'évidence des résultats obtenus.

PROTOCOLES D'UTILISATION AROSHA WAVESHAPE 3.0

En utilisant différentes combinaisons de ces fonctions multiples, WAVESHAPE 3.0 vous permet de créer des traitements spécifiques pour atteindre l'objectif souhaité. Les traitements sont divisés en 3 macro-catégories :

1. DRAIN & CELLULITE

Programmes ciblés pour un traitement intensif contre la cellulite, l'adiposité localisée et le drainage. Il exploite l'action anticellulite et lipolytique combinée des ultrasons et de la puissance électrique à l'aide d'ondes électriques spécifiquement conçues.

l'action anticellulite et lipolytique combinée des ultrasons et de l'énergie électrique en utilisant des ondes électriques spécialement conçues à cet effet (ondes LIPOLYTIQUES et DRAINANTES).

spécialement conçues à cet effet (ondes LIPOLYTIQUES et DRAINANTES). Toutefois, les phases de travail musculaire sont utiles pour la consommation ultérieure des graisses et pour la tonification.

des graisses et pour une action tonifiante.

PROGRAMMES:

- 1 > DRAINAGE FOCALISÉ
- 2 > CELLULITE FIBREUSE
- 3 > CELLULITE SCLEROSEES
- 4 > ADIPOSITEES

2. TONIQUE

Programmes plus axés sur l'amélioration de la force et du tonus musculaire. Ces programmes utilisent l'action lipolytique des ultrasons et exploitent l'énergie électrique pour stimuler le travail musculaire afin de remodeler le corps.

PROGRAMMES :

- 5 > TONUS PROGRESSIF
- 6 > TONUS ACTIF
- 7 > TONUS ÉNERGÉTIQUE
- 8 > MODELAGE DES FESSIERS ET DES CUISSES
- 9 > MODELAGE DES ABDOMINAUX

3. BIEN-ÊTRE


Programmes spéciaux pour les jambes lourdes, récupération musculaire, maintien du tonus musculaire, amélioration de l'élasticité de la peau.

PROGRAMMES :

- 10 > JAMBES LOURDES
- 11 > MINCEUR
- 12 > PEAU ÉLASTIQUE
- 13 > RÉCUPÉRATION
- 14 > FITNESS



NEA98PRO

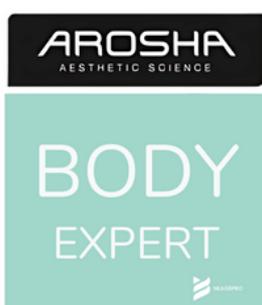

AROSHA
AESTHETIC SCIENCE