

KIT PRELEVEMENT URETRAL

INFORMATIONS DESTINEES AU PRELEVEUR

Le prélèvement doit être effectué le **matin avant toute toilette ou au **moins 2 heures après la dernière miction** et avant tout traitement antibiotique.**

☛ **Matériel nécessaire fourni par le laboratoire:**
(ATTENTION aux dates de péremption, conservation à température ambiante avant utilisation et à l'abri de la lumière)

①



1 écouvillon type e-Swab fin avec milieu de transport (casser la tige de l'écouvillon après prélèvement dans le milieu de transport)

②



1 flacon (recueil **1^{er} jet d'urines pour les chlamydiae)**

③



En cas de recherche de **mycoplasmes** : nécessité de prendre rendez-vous au laboratoire

④



En cas de recherche d'**Herpès génital** : nécessité de prendre rendez-vous au laboratoire

➤ Déroulement du prélèvement :

- Prélever avec l'écouvillon type e-swab au niveau du méat urinaire comme indiqué ci-dessus
- Recueillir les urines du 1^{er} jet dans un flacon stérile pour les recherches de Chlamydiae trachomatis (la recherche est réalisée systématiquement selon la NABM)
- Remplir la fiche de renseignements cliniques

➤ Conservation et transport :

Conservation après prélèvement : **Température ambiante**
Délai avant acheminement au laboratoire : **< 24H impérativement**