



MÁSCARAS DE TECIDO

**Soluções
Corporativas**



Frente ao cenário de crise global na saúde e economia, as máscaras de tecido serão mais que um item do vestuário. Seu uso, **orientado pelo Ministério da Saúde**, é uma demonstração de respeito e responsabilidade.

RETALHAR, COTTON MOVE e SOUZA E CAMBOS se uniram para oferecer uma solução a preço justo e capaz de atender às demandas de grande escala e curto prazo, aspectos fundamentais para a contenção da pandemia.

_Quem somos



A **Retalhar** é uma Empresa B certificada que realiza a gestão responsável, inovadora e inclusiva de resíduos têxteis.




A **Cotton Move** é uma empresa certificada GRS especializada em pesquisa e desenvolvimento de produtos reciclados e circulares na indústria têxtil.



Souza e Cambos é uma indústria certificada ABVTEX em responsabilidade social e há mais de 30 anos no mercado produzindo fios, tecidos e confeccionados.

_ Nossa solução

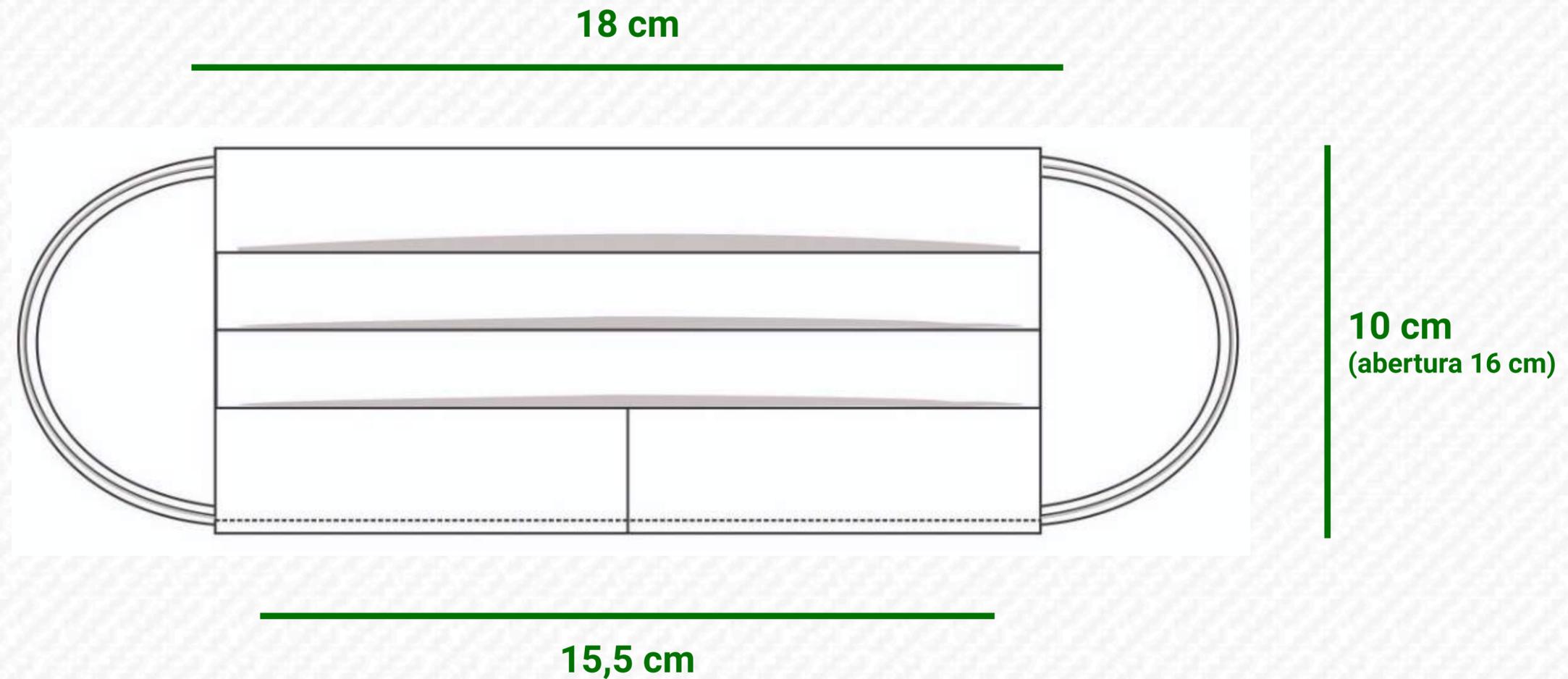

Dupla camada em tela
100% algodão BCI - 274 g/m²
cor branca.

Produto desenvolvido conforme [recomendações do SENAI](#).

Benefícios dos materiais



**Conforto
térmico;**



Toque suave;



**Fonte
renovável;**



Retenção;



Reutilizável.

Diferenciais



Fornecedor
certificado;



Preço justo e
acessível;



Fibra **natural;**



Feito no **Brasil.**



R\$ 3,20 /un. *

Pedido mínimo 1.000 un;
(Frete incluso para entregas em São Paulo - SP)

*** Valor para pagamento à vista e sujeito a alteração sem aviso prévio.**

Recomendações de uso

- O uso é **individual**, não compartilhado;
- **Lave as mãos** (ou use álcool gel) e seque bem antes de colocar e tirar a máscara;
- Coloque a máscara de forma a **cobrir o nariz e o queixo**;
- **Evite mexer** para ajustar a máscara. Se mexer, **higienize as mãos** antes e depois;
- **Nunca toque no tecido** da máscara, apenas no elástico;
- Se a máscara umedecer, troque imediatamente. A **umidade reduz a capacidade** filtrante do tecido;
- **Lave com água quente e sabão** após o uso;
- **Só use** a máscara quando estiver **seca**;
- **Antes de descartar, lave mais uma vez**. O vírus pode permanecer ativo nas máscaras por até 7 dias. Proteja o próximo!

Fonte: Ministério da Saúde.

Recomendações de **lavagem**

- **Deixar a máscara de molho** por 30 minutos em mistura de 500 ml de água potável com 10 ml de água sanitária;
- **Lavar com água e sabão** e enxaguar;
- Estender para **secar**, preferencialmente **ao Sol**;
- Passar com ferro quente e acondicionar em saco plástico fechado.
- Havendo sinais de deterioração, descarte a máscara. Não esqueça de lavar mais uma vez antes.

Fonte: Ministério da Saúde.





Para agilizar
seu orçamento

CLIQUE AQUI

e preencha nosso formulário
em 2 minutos



retalhar

+55 11.98889-3442 (somente WhatsApp)
comercial@retalhar.com.br